



BA-Nr.: 01.06.083/2021-10-A01



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Telefonas: 05431/9416-0
Faksas: 05431/9416-66
Tinklapis: www.rebotec.de
El-paštas: info@rebotec.de



Naudojimo instrukcija

Tualetu, dušo kėdė

	Tualetu kėdė „Köln“	Dušu kėdė „Zwickau“	Tualetu-dušu kėdė „Konstanz“
REF	340.XX.YY	332.XX.YY	341.XX.YY
	130 kg	130 kg	130 kg
	Tualetu kėdė „Kiel“	Dušu kėdė „Würzburg“	Tualetu-dušu kėdė „Ulm“
REF	347.XX.YY <i>Reguliuojamas aukštis</i>	333.XX.YY <i>Reguliuojamas aukštis</i>	348.XX.00 <i>Reguliuojamas aukštis</i>
	130 kg	130 kg	130 kg

XX=Spalvų pasirinkimas YY= Įrenginio variantas



Vaizdas



Prieš pirmą kartą naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir turėkite ją prieinamą naudotojui, išsaugokite ją vėlesniam naudojimui ir pridėkite perpardavimo atveju.

**Turinys****Brėžinys ir matmenys 11**

1. Priemonės aprašas	3
1.1. Įvadas	3
2. Veikimo funkcijos	3
2.1. Naudojimo paskirtis	3
2.2. Naudojimas	4
2.3. Sandėliavimas ir transportavimas	4
2.4. Pakuotė	4
2.5. Atliekų šalinimas	4
3. Simboliai ir etiketės	4
4. Saugos instrukcijos	4
5. Pranešimas apie incidentus	5
6. Garantija	5
6.1. Skundas	5
7. Pakartotinis naudojimas, tarnavimo laikas	5
8. Pristatymo apimtis	6
9. Naudojimo būklės nustatymas	6
9.1. Porankių montavimas	6
10. Gaminio duomenys	6
11. Priemonės eksploatavimas	7
11.1. Atsisėsti	7
11.2. Atsistoti	7
11.3. Atsikelti	7
11.4. Pasukami žemyn porankiai	7
11.5. Dušo-tualetu sėdynės nuėmimas	8
11.6. Tualetu kibiras	8
11.7. Sėdynės aukščio reguliavimas	8
11.8. Gedimų šalinimas	8
12. Priežiūra ir aptarnavimas	8
12.1. Priežiūra	8
12.2. Aptarnavimas	8
13. Atsarginės dalys ir priedai	10
14.	

1. Priemonės aprašas



Paveikslėlyje pavaizduota:

A	Nugaros atrama
B	Porankis (pasukamas)
C	Fiksavimo varžtai
D	Kėdės rėmas su atramomis
E	PUR sėdynė su higienine anga
F	Dušo sėdynė
G	Tualetu sėdynė
H	Antgaliai
I	PUR-Sėdynės paminkštėjimas (nuimamas)
J	Aukščio reguliavimas – atraminių kojelių ir sėdynės
K	Tualetu kibiras ir dangtis (REF. 362.00.31)
L	Kibiro laikiklis
M	Identifikacinė lentelė

1.1. Įvadas

- Čia aprašytas gaminys yra I rizikos klasės medicinos priemonė pagal (ES) 2017/745 MDR.

- Šiame naudotojo vadove rasite informacijos apie saugų ir tinkamą šio gaminio pradinį veikimą, naudojimą, techninę priežiūrą ir priežiūrą.
- Prieš naudodami priemonę atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą. Laikykitės saugos instrukcijų ir elkitės pagal jas.

2. Veikimo funkcijos

2.1. Naudojimo paskirtis

Köln, Kiel – Tualetu kėdė

- Gaminys skirtas pacientams prižiūrėti, kurių gebėjimas stovėti yra ribotas. Priemonė padeda nueiti į tualetą, net jei įprastas tualetas ar vonios kambarys nepasiekiamas. Pacientas turi būti pakankamai pajėgus sėdėti ir turėti pakankamai viršutinės kūno dalies raumenų. Jei reikia, naudojimosi metu turi dalyvauti slaugytojas. Gaminys neskirtas ilgai sėdėti

Zwickau, Würzburg – Dušo kėdė

- Gaminys skirtas pacientams prižiūrėti, kurių gebėjimas stovėti yra ribotas. Sėdint priemonėje galima nusiprausti duše. Pacientas turi gebėti sėdėti ir tvirtus viršutinės kūno dalies raumenis. Jei reikia, naudojimosi metu turi dalyvauti slaugytojas. Gaminys neskirtas ilgai sėdėti

Konstanz, Ulm – Dušo-tualetu kėdė

- Gaminys skirtas pacientams prižiūrėti, kurių gebėjimas stovėti yra ribotas. Sėdint priemonėje galima nusiprausti duše, paprasta nueiti į tualetą, net jei įprastas tualetas ar vonios kambarys yra nepasiekiamas. Pacientas turi būti pakankamai pajėgus sėdėti ir turėti tvirtus kūno raumenis. Jei reikia, naudojimosi metu turi dalyvauti slaugytojas. Gaminys nėra skirtas ilgam sėdėjimui.

Specifikacija:

- Maksimalus naudotojo svoris: 130kg
- Stabili kėdė
- Reguliuojamo aukščio kojos
- Skirtas naudoti patalpose

Indikacijos

- Jei pacientai negali lankytis stacionariame tualete dėl apatinių galūnių funkcijų pažeidimo, kai jų judrumas ir raumenų jėga yra riboti arba visai išnykę, ir (arba) vestibuliarinių funkcijų pažeidimo arba polinkio kristi dėl kitų priežasčių, tuo pat metu išlaikant pakankamai stabilią krūtinės ląstos padėtį sėdint ir pakankamas viršutinių galūnių funkcijas.

- Tikslas: Suteikti galimybę savarankiškai ar savarankiškiau lankytis tualete.

Diagnozių pavyzdžiai:

- Galimų diagnozių spektras yra platus. Nuo bendro senatvinio silpnumo iki apatinių galūnių artrozės.

2.2. Naudojimo sąlygos

- Temperatūros diapazonas: Nuo 5 °C iki 35 °C; būtina vengti tiesioginio gaminio kaitinimo.
- Santykinė oro drėgmė: 40-75 %. Už šių sąlygų ribų gaminį galima naudoti tik trumpą laiką.
- Gaminio negalima naudoti baseinuose ar saunose, nes gali atsirasti paviršiaus spalvos pakitimų ir mechaninio atsparumo apribojimų.
- Transportuoti ar sandėliuoti skirtą gaminį galima išardyti.
- Turi būti pakankamo dydžio plokščias paviršius, ant kurio būtų galima pastatyti kėdę. Žr. 14.

2.3. Sandėliavimas ir transportavimas

- Temperatūros diapazonas: Nuo 5 °C iki 25 °C; būtina vengti tiesioginio gaminio kaitinimo.
- Gaminį laikykite sausose patalpose, kuriose oro drėgmė neviršija 65 %.
- Dušas turi būti suprojektuotas taip, kad būtų pakankamo dydžio plokščias paviršius C.


2.4. Pakuotė

- Mes rekomenduojame laikyti įpakavimą tolesniam priemonės transportavimui.
- Matmenys: 570mm x 640mm x 570mm

2.5. Atliekų šalinimas

- Panaudotų gaminių ir pakuočių šalinimas ir perdirbimas turi būti vykdomas pagal šiuo metu galiojančias taisykles. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į utilizavimo įmonę.
- Būtina laikytis Apsaugos nuo infekcijų įstatymo.
- Laikykitės visų etiketėje pateiktų įspėjimų ir informacijos ant pakavimo medžiagos ir elkitės atitinkamai.

3. Simboliai ir etiketės

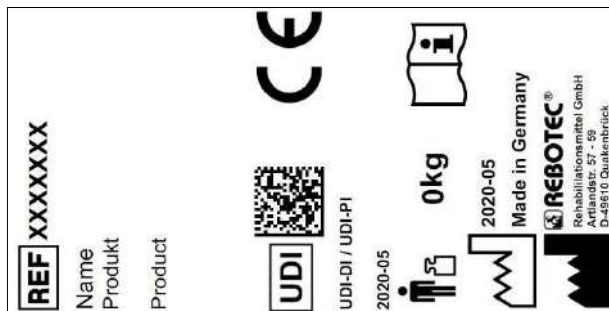

Panašus paveikslėlis.



Identifikacinė etiketė negali būti pašalinta!



Užsakant atsargines dalis ir nagrinėjant skundus reikės nurodyti prietaiso pavadinimą, serijos numerį ir pagaminimo metus.

Simbolis	Reikšmė	Simbolis	Reikšmė
	Perskaityti naudojimo instrukciją!		Priemonės pagaminimo metai
	Serijos numeris		Wichtige Information!
	Artikulas		Maksimalus naudotojo svoris kg
	Valymo instrukcijos		Priežiūros instrukcijos
	Skirtas naudoti tik patalpose.		Gamintojas
	Vizualus perpėjimas		Kalba
	Perskaitykite naudojimo instrukciją!		Nešalinkite priemonėse buitinėse atliekose.
	Priemonė atitinka (EU) 2017/745 MDR		
	Atsargiai! Perskaitykite saugumo instrukcijas		
	Unikalus priemonės identifikatorius (Data: GTIN / LOT (SN) / Baujahr)		
	Medical Device-Kennzeichen Bei dem Artikel handelt es sich um ein Medizinprodukt.		

4. Saugos instrukcijos



Laikykitės šių saugos reikalavimų:



- Naudojimo instrukciją būtina perskaityti iki galo, kad būtų išvengta pavojaus ar žalos dėl netinkamo naudojimo.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite priemonę, ar nėra matomų pažeidimų ar trūkumų.
- Esant bet kokiems gedimams ar pažeidimams, priemonės naudoti negalima

Atsargiai: Pavojus nukristi!

- Pacientui atsisėsti, atsikelti, perkelti reikia prižiūrint arba padedant apmokytam slaugytojui, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę.
- Pacientai, kurie yra linkę į nekontroliuojamus veiksmus ar judesius, naudodamiesi kėde turi būti prižiūrimi.

Atsargiai: Pavojus sulūžti!

- Gaminys tinka tik kaip sėdynė žmonėms. Laikykites leistino naudotojo svorio.
- Nelaikykite gaminio dideliuose temperatūros svyravimuose.

Atsargiai: Pavojus apsiversti!

- Sėdint ir judant kėdėje ji turi būti tik su užfiksuotais porankiais.
- Gaminį naudokite tik uždaroje patalpose ir ant lygaus, neslidus paviršiaus.
- Nepersisverkite per kėdę.
- Naudodami reguliuojamo aukščio kėdę, atkreipkite dėmesį į atitinkamas reguliavimo instrukcijas.
- Sureguliuokite visas 4 kėdės kojas į tą patį sėdynės aukštį.
- Nenaudokite kėdės, jei yra pažeistos siurbimo kojelės.

Pavojus: Pavojus būti suspaustam!

- Atlenkdami porankius aukštyne arba žemyn, nesiremkite į sąnarių kreipiančiąją, kad neįstrigtų kūno dalys ar kiti daiktai. Šiuo tikslu taip pat žr. 9 skyrių 6 puslapyje.
- Tvirtindami sėdynę, nesiartinkite tarp sėdynės paviršiaus ir sėdynės rėmo, kad neužstrigtų kūno dalys.
- Ištraukiant ir įkišant klozeto kibirą kyla pavojus užspausti paciento minkštuosius audinius. Kad išvengtumėte sužalojimų, kibirą galima ištraukti arba įstumti tik tada, kai kėdėje nesėdi joks naudotojas.

Rizika susižaloti!

- Esant > 40 °C paviršiaus temperatūrai, kyla pavojus susižeisti. Todėl nelaikykite gaminio aukštoje temperatūroje (pvz., saulės spinduliuose, šalia radiatorių, karštame vandenyje). Prieš naudodami gaminį leiskite jam atvėsti.



Jeigu gaminį naudoja pacientai, kurių oda yra jautri (nejaučia temperatūros ar turi odos pažeidimų), slaugos personalas turi atlikti karščio patikrinimą (pvz., paliesti rankos nugarėle).

5. Pranešimai apie incidentus

- Apie rimtus su gaminiu susijusius incidentus būtina nedelsiant pranešti gamintojui ir BfArM.
 - o BfArM: www.bfarm.de/DE
 - Naudokitės pranešimų teikimo funkcijomis ir pateiktomis formomis.
 - o Gamintojas: pms@rebotec.de

6. Garantija

- Šiam gaminiui gamintojas suteikia 12 mėnesių garantiją. Pagrindinė sąlyga yra bendrųjų sąlygų (www.rebotec.de/agbs) laikymasis ir numatomas naudojimas. Taikomos įstatyminės garantijos nuostatos.
- Neteisėti šio gaminio pakeitimai panaikina gaminio atitiktį ir garantiją.

6.1. Skundas

- Prieš gražindami gaminį susisieki su mumis.
- Norėdami sumažinti transportavimo žalą, jei įmanoma, naudokite originalią pakuotę.
- Būtina laikytis Apsaugos nuo infekcijų įstatymo.
 - o Prašome įsitikinti, kad gražinamas gaminys nekelia infekcijos pavojaus.
 - o Kartu su gaminiu pridėkite saugos informacijos lapą.
 - o Už gražinimą, kuris nepažymėtas kaip nepriimtinas, gali būti patiriamos išlaidos.

7. Pakartotinis naudojimas, tarnavimo laikas

- Priemonė tinkama naudoti pakartotinai. Kaip dažnai gaminį galima naudoti pakartotinai, priklauso nuo naudojimo dažnumo ir pobūdžio.

- Prieš pakartotinai naudojant gaminį, jis turi būti higieniškai apdorotas, o gaminio techninė ir funkcinė sauga bei patikimumas turi būti patikrinti ir, jei reikia, atkurti. Žr. 12.
- o Išsamesnės informacijos rasite pakartotinio apdorojimo instrukcijose (02.12.156) ir techninės priežiūros instrukcijose (02.11.150).
- o Dokumentus galima atsisiųsti iš toliau pateiktos nuorodos.
 - www.rebotec.de/downloads
- Jei gaminyje naudojamas pagal paskirtį, jo naudojimo trukmė yra 5 metai. Faktinis tarnavimo laikas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo dažnumo ir intensyvumo bei bendros būklės.

8. Pristatymo apimtis

- o 1x dušo-tualetu kėdė
- 1x naudotojo vadovas (01.06.083)
- 1x techninės priežiūros instrukcija (01.11.150)
- Perdirbimo ir techninės priežiūros instrukcijas galima užsisakyti arba peržiūrėti ir atsisiųsti adresu www.rebotec.de/downloads.

9. Naudojimo būklės nustatymas

- Gaminys buvo kruopščiai patikrintas gamykloje, kad būtų be defektų ir būtų išbaigtas. Gavę gaminį patikrinkite, ar jis nėra pažeistas transportavimo metu ir ar pristatymo apimtis yra pilna.


9.1. Porankių atramų montavimas



- Pasukite porankį atgal, uždėkite atlošą ant kėdės rėmo vamzdžių ir stumkite jį ant pagrindo rėmo tiek, kiek galima.

- Dar kartą pasukite porankius į priekį, kad jie atsistų atlošo griovelyje ir pagrindo rėme esančiame fiksavimo varžte.

- Kėdžių su aukščio reguliavimu sėdynės aukštis pristatymo metu yra žemiausioje padėtyje (pagrindinė padėtis). Jei reikia, sureguliuokite sėdynės aukštį.

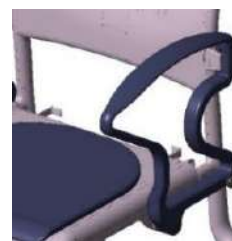

10. Gaminio duomenys

- Mes pasilieiname teisę daryti pakeitimus, susijusius su techniniais pokyčiais, palyginti su šioje naudojimo instrukcijoje pateikta versija.
- Žr. 14.

Pavadinimas		Duomenys
Köln		
1.	Apkrova	max. 130 kg
2.	Gaminio svoris*	11,2 kg
3.	Bendras svoris*	13,6 kg
Atitiktis		DIN EN 10993-1/-5

*Ohne Zubehör

Pavadinimas		Duomenys
Zwickau		
1.	Apkrova	max. 130 kg
2.	Gaminio svoris*	9,2 kg
3.	Bendras svoris*	11,6 kg
Atitiktis		DIN EN 10993-1/-5

*Ohne Zubehör

Pavadinimas		Duomenys
Konstanz		
1.	Apkrova	max. 130 kg
2.	Gaminio svoris*	12,4 kg
3.	Bendras svoris*	14,8 kg
Atitiktis		DIN EN 10993-1/-5

*Ohne Zubehör

Pavadinimas		Duomenys
Kiel		
1.	Apkrova	max. 130 kg
2.	Gaminio svoris*	11,2 kg
3.	Bendras svoris*	13,6 kg
Atitiktis		DIN EN 10993-1/-5

*Ohne Zubehör

Pavadinimas		Duomenys
Würzburg		
1.	Apkrova	max. 130 kg
2.	Gaminio svoris*	9,2 kg
3.	Bendras svoris*	11,6 kg
Atitiktis		DIN EN 10993-1/-5

*Ohne Zubehör

Pavadinimas		Duomenys
Ulm		
1.	Apkrova	max. 130 kg

Pavadinimas	Duomenys
2. Gaminio svoris*	12,4 kg
3. Bendras svoris*	14,8 kg
Atitiktis	DIN EN 10993-1/-5

*Ohne Zubehör

11. Priemonės eksploatavimas

- Prieš atsisėdami įsitikinkite, kad kėdė yra apsaugota nuo nuslydimo ir apvirtimo, porankiai yra tinkami, tinkamai pritvirtinti, dušo ir (arba) tualetu sėdynė yra tvirtai pritvirtinta.



Prireikus, atsižvelgiant į paciento apribojimus (pakankamą judrumą ir raumenų jėgą), atsisėsti ir atsikelti turi padėti slaugytojas. Vėlesnius reguliavimus gali atlikti tik kvalifikuotas personalas.

11.1. Atsisėsti

- Prieš atsisėdami įsitikinkite, kad kėdė yra apsaugota nuo nuslydimo ir apvirtimo, porankiai yra tinkami, tinkamai pritvirtinti, dušo ir (arba) tualetu sėdynė yra tvirtai pritvirtinta.

11.2. Atsistoti

1.



son helfen lassen.

Naudotojas turi būti kuo arčiau gaminio. Jei reikia, jis gali remtis į porankius.

Jei tai neįmanoma dėl naudotojo negalios, naudotojui turi padėti kompetentingas asmuo. d



Atsargiai: Pavojus nukristi!

2.



Venkite įgriuvimo į kėdės sėdynę. Jei įmanoma, pacientas turėtų sėdėti ant viso sėdynės paviršiaus, o ne tik ant sėdynės krašto.

Sėdėdami visiškai atsiremkite į atlošą.

11.3. Atsikelti

- Prieš keldamiesi įsitikinkite, kad kėdė yra apsaugota nuo slydimo ir pasvirimo, o porankiai tinkamai pritvirtinti.
- Pacientas ant kėdės turi pasislinkti į priekį, kad jo kojos būtų ant grindų. Tada pacientas turi remtis rankomis į porankius ir lėtai pakilti nuo kėdės.

Kad išvengtumėte pavojaus nukristi, nepasilenkite per daug į priekį.

Pacientui atsistoti turėtų padėti slaugytojas.

3.



11.4. Pasukami žemyn porankiai


- Ištraukę fiksavimo varžtus (A) atlaisvinsite fiksavimo mechanizmą ir porankius galėsite pasukti atgal. Atlenkdami porankį patikrinkite, ar teisingai uždėtas atlošo fiksatorius (B) ir fiksavimo varžtas (A).



Atsargiai: pavojus prispausti arba užspausti!

- Porankius galima pasukti abiem rankomis. Norėdami tai padaryti, laikykite fiksavimo varžtą (A) ištrauktą viso pasukimo metu ir kita ranka nukreipkite porankį į tašką (C).

Palieskite tik išorinę sritį ir nelieskite porankio.

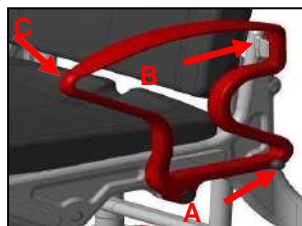

Reguliariai tikrinkite užraktą, nes galimos kalkių nuosėdos ant užrakto mechanizmo gali pabloginti jo slandų veikimą.

11.5. Dušo-tualetu sėdynės nuėmimas

- Sėdynę iš užfiksuotos padėties galima nuimti ją pakėlus ir išvalyti arba ją pakeisti.

11.6. Tualetu kibiras

Tualetu kibirą po sėdyne pakiškite iš galo. Norėdami jį išimti, šiek tiek pakelkite kibirą ir ištraukite atgal.

- Versijoje su dviejų dalių tualetu sėdyne tualetu kibirą galite įdėti ir išimti pakeldami sėdynę iš viršaus.

11.7. Sėdynės aukščio reguliavimas

- Kėdės aukštį galima reguliuoti, kad būtų galima nustatyti pacientui tinkantį sėdynės aukštį arba kad kėdę būtų galima pastumti virš pakelto klozeto.
- Aukštis reguliuojamas (2 padėrys: po 25 mm) naudojant 4 kištukus kėdės rėme.



Įspėjimas: Apvirstimo pavojus!

Įsitikinkite, kad visi keturi įdėklai nustatyti viename aukštyje ir varžtai priveržti ranka.

- Norint sureguliuoti, rekomenduojame kėdę pastatyti šonu ant lygaus paviršiaus. Nuimkite klozeto kibirą (jei naudojamas) ir sėdynės dangtį.
- Allen raktu (SW 5) visiškai atlaisvinkite rėmo varžtą (sukimas prieš laikrodžio rodyklę). Atlaisvindami varžtą, spauskite prie savaiminio fiksavimo veržlės (apatinėje pusėje).



- Ištraukite arba įstumkite stovo įdėklą, kol skylių raštas sutaps su kitu nustatymo lygiu.
- Prisukite stovo įdėklą atgal naudodami gale esančią apsauginę veržlę (sukimas pagal laikrodžio rodyklę).

11.8. Gedimų šalinimas

Gedimas	Galima žala	Veiksmai
Porankiai negali būti atlenkti atgal	Nuosėdos užrakte (užrakto varžte)	Valyti ir reguliariai tikrinti.

Störung	mög.Ursache	Abhilfe
Tvirtinantis varžtas negali būti ištrauktas	Nuosėdos, įtempimo spyruoklė užstrigusi arba sugedusi	Valymas, reguliarius varžtų pakeitimas
Kėdė svyruoja	Pažeistas antgalis	Visuomet keiskite antgalius poromis
Kėdė svyruoja	Stovo įdėklų aukščio reguliavimas. Skirtingo aukščio nustatymas	Tinkamas aukščio nustatymas
Užstrigęs kojos įdėjimas ir aukščio reguliavimas	Nuosėdos	Ištraukite ir išvalykite ertmę
Nestabilus kėdės rėmas	Per laisvos varžtų jungtys	Užveržkite rėmo ir kojų varžtinį sujungimą
Kėdės rėmas arba kitos dalys yra pažeistos	Perkrova, nusidėvėjimas	Atlikti techninę priežiūrą

12. Priežiūra ir aptarnavimas

12.1. Priežiūra



Gaminį galima valyti švelnia įprastine valymo ir dezinfekavimo priemone. Po valymo nuvalykite gaminį švaria, drėgna šluoste, ir nusauskite su švaria šluoste.

- Nenaudokite šveitimo priemonių ar agresyvių sudedamųjų dalių (rūgščių, skiediklių) turinčių valymo priemonių, taip pat kietų valymo daiktų (šepetėlių), priešingu atveju gali būti pažeisti paviršiai arba ant medžiagų gali susidaryti nuosėdų.
- Laikykite gaminį švarų ir reguliariai jį valykite. Ypatingą dėmesį reikia skirti higienai jautriose vietose*
- Gaminys tinka valyti ir dezinfekuoti rankiniu būdu. Laikykites pakartotinio valymo instrukcijų (02.12.156).



12.2. Aptarnavimas

- Laiku neatpažintas nusidėvėjimas ir (arba) netinkamas naudojimas, taip pat nereguliari techninė priežiūra arba jos nebuvimas gali sukelti nelaimingus atsitikimus.



Saugumo tikslais ebnt kartą per metus būtina atlikti gaminio profesionalią apžiūrą.

- Patikrinkite gaminį, ar nėra matomų pažeidimų (įtrūkimų, lūžių, atsilaisvintųjų dalių)
- Prieš naudodami patikrinkite stabilumą
- Jei turite klausimų dėl gaminio priežiūros, kreipkitės į įgaliotąjį pardavėją arba medicinos ir sveikatos priežiūros reikmenų parduotuvę.
- Sugadinimo ir (arba) remonto atveju nedelsdami kreipkitės į įgaliotąjį pardavėją.
- Niekada nebandykite atlikti jokių neleistinių gaminio pakeitimų ar pertvarkymų. Jie gali pakenkti gaminio saugai ir tinkamam veikimui. Tokiais atvejais REBOTEC neprisiima jokios atsakomybės.
- Remontui naudokite tik originalias atsargines dalis. Žr. 6.
- Atkreipkite dėmesį į 13 ir 7 skyrius.
- Atlikus techninės priežiūros ar remonto darbus, prieš vėl naudodami gaminį rekomenduojame jį išvalyti.
- Laikykitės techninės priežiūros instrukcijų (02.11.150).

13. Atsarginės dalys ir priedai




Nr.	Art.-Nr.	Pavadinimas
1	301.00	Tualetų kibiras Standard
2	307. *	Tualetų sėdynė
3	169. * 30	Pritraukiamas prie grindų antgalis 30 mm
4.	440.00.15	Nugaros atrama
5.	440. * .62	PUR kilimėlis dušo ir tualetų sėdynei
-	440. * .04	PUR dušo sėdynė su kibiro laikikliu
-	308.54	Standartinė dušo sėdynė
-	01.06.083	Vartotojo vadovas
-	01.12.156	Pakartotinio naudojimo instrukcija
-	01.11.150	Priežiūros instrukcijos

* Pasirinkite spalvą



Tinkamam ir saugiam prietaiso veikimui užtikrinti naudokite tik REBOTEC atsargines dalis ir priedus.

14. Brėžinys ir matmenys

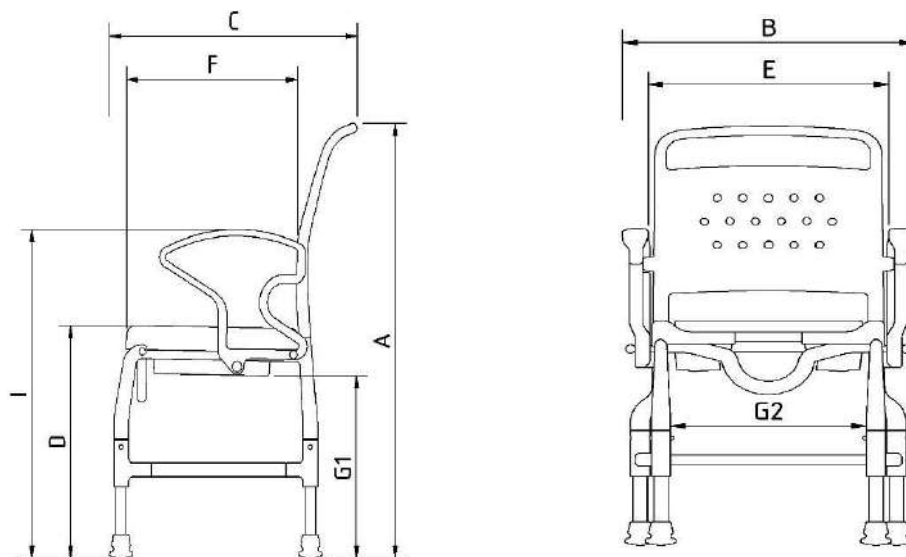

Nr.	Pavadinimas	Köln- matmenys / mm	Kiel- matmenys / mm
A	Aukštis	1010	990-1040
B	Plotis	570	570
C	Gylis	630	630
D	Sėdynės aukštis	520	510-560
E	Sėdynės plotis	460	460
F	Sėdynės gylis	450	450
G1	Reguliuojamas aukštis*	440	430-470
G2	Reguliuojamas aukštis*	480	460-510

* G1= su kibiro laikikliu, G2= be kibiro laikiklio

Gamybiniai matmenų nuokrypiai: +/- 5 mm

Nr.	Pavadinimas	Zwickau- matmenys / mm	Würzburg- matmenys / mm
A	Aukštis	1010	990-1040
B	Plotis	570	570
C	Gylis	630	630
D	Sėdynės aukštis	510	500-550
E	Sėdynės plotis	460	460
F	Sėdynės gylis	450	450
G1	Reguliuojamas aukštis*	430	420-470
G2	Reguliuojamas aukštis*	480	460-510

* G1= su kibiro laikikliu, G2= be kibiro laikiklio

Gamybiniai matmenų nuokrypiai: +/- 5 mm

Nr.	Pavadinimas	Konstanz- matmenys / mm	Ulm- matmenys / mm
A	Aukštis	1010	990-1040
B	Plotis	570	570
C	Gylis	630	630
D	Sėdynės aukštis	540	520-570
E	Sėdynės plotis	460	460
F	Sėdynės gylis	450	450
G1	Reguliuojamas aukštis*	430	410-460
G2	Reguliuojamas aukštis*	480	460-510

* G1= su kibiro laikikliu, G2= be kibiro laikiklio

Gamybiniai matmenų nuokrypiai: +/- 5 mm

Matmenys ir svoris priklauso nuo įrangos. Dėl gamybos tolerancijų gali atsirasti nedidelių nukrypimų. Pasilieka teisę daryti pakeitimus



LT



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
D-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Tinklapis: www.rebotec.de
El-paštas: info@rebotec.de

