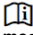

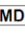



# Naudojimo instrukcija

## Hyper Foam 2 clinic

Čiužinys aukštai pragulų rizikai

Prieš naudodamiesi sistema atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir atkreipkite dėmesį į įspėjimus!

Gaminio pavadinimas	Hyper Foam 2 clinic
Pakuotės sudėtis	<ul style="list-style-type: none"><li>Čiužinys aukštai pragulų rizikai su putų poliuretano užpildu</li><li>Užvalkalas iš poliuretano (nuvelkamas su užtrauktuku)</li><li> Vartotojo instrukcijas kitomis kalbomis galite rasti: <a href="http://manuals.funke-medical.eu">manuals.funke-medical.eu</a></li></ul>
Indikacijos / taikymo sritis	<ul style="list-style-type: none"><li>Pragulų profilaktikai</li><li>Pragulų gydymas iki 4 lygio (pagal Seiler / EPUAP)</li><li>Asmenims, kuriems yra didelė pragulų rizika</li></ul>
Kontraindikacijos	Nežinomos
Leidžiamas naudotojo svoris min. – maks.	20 - 150 kg
Medžiaga	<ul style="list-style-type: none"><li>Užpildas: poliuretano putos</li><li>Užvalkalas: poliuretanas dengtas polietersulfonu</li></ul>
Išmatavimai	Plotis: 80 - 100 cm; Ilgis: 190 – 220 cm
Gaminio svoris	12 kg (90/200 cm)
Pagalbos numeris (pagal §139 SGB V)	
Medicinos priemonė	Klasė 1, MDR 2017/745  
Techninė sauga / antipireninės savybės	Antipireninių savybių tyrimas atliktas pagal DIN EN 597 I + II, BS 7175 sec 3 crib 5, BS 7177
Toksikologinio kenksmingumo tyrimas / biologinis suderinamumas	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Įspėjimai	<ul style="list-style-type: none"><li>Prieš pradėdami sistemą naudoti pirmą kartą, turite paruošti sistemą pirmajam naudojimui (žr. Sistemos paruošimas naudojimui).</li><li>Tinka reguliuojamiems gulimiems paviršiams</li><li>Viršutinis šoninių turėklų kraštas turi būti bent 22 cm virš neapkrauto čiužinio viršaus</li></ul>
Garantija	5 metai dėl putų poliuretano užpildo
Techninė priežiūra	Neatliekama
Valymo instrukcija (čiužinio užvalkalas)	<ol style="list-style-type: none"><li>Užvalkalą galima valyti šluoste, naudojant dezinfekavimo priemones, pagamintas iš izopropanolio (pvz.: Bacillol) arba naudojant kitus DGHM sąraše nurodytus produktus (pvz.: ECOLAB valymo šluoste Incidin OxyWipe S XL). Galimas cheminis valymas karščiu.</li><li>Alternatyvus valymas įstaigose: užvalkalas gali būti dezinfekuojamas autoklave pagal RKI rekomendacijas. DĖMESIO: jeigu matomų nešvarumų pašalinti neįmanoma, užvalkalą reikia utilizuoti pagal atliekų tvarkymo taisykles.</li></ol> 
Valymo instrukcija (užpildas)	<ol style="list-style-type: none"><li>Putų poliuretano užpildą galima valyti parduodamomis valymo priemonėmis. Užpildą galima mirkyti į valymo tirpalą arba apipurkšti dezinfekavimo priemone (pvz.: Bascillol arba ECOLAB putų purškikliu Incidin OxyFoam S, kurio sudėtyje yra vandenilio peroksido). Po valymo leiskite užpildui išdžiūti savaime.</li><li>Alternatyvus valymas įstaigose: užvalkalas gali būti dezinfekuojamas autoklave pagal RKI rekomendacijas. DĖMESIO: jeigu matomų nešvarumų pašalinti neįmanoma, užvalkalą reikia utilizuoti pagal atliekų tvarkymo taisykles.</li></ol>
Sistemos paruošimas naudojimui	<ol style="list-style-type: none"><li>Gaminys tinkamas naudoti namuose ir įstaigose.</li><li>Gavę čiužinį iš karto išimkite iš dėžės.</li><li>Padėkite čiužinį ant lovos.</li><li>Atkreipkite dėmesį į įspaudą „ŠIA PUSE Į VIRŠŲ“ ant čiužinio viršaus.</li></ol>

RKI = Roberto Kocho institutas; DHGM = Vokietijos higienos ir mikrobiologijos draugija; Autoklavavimas = frakcionuotas vakuuminis procesas 105 °C temp. 55 min.

 Gamintojai, kaip apibrėžta MDR 2017/745

Funke Medical GmbH Ahrenfeld 10 46348 Raesfeld Tel.: +49-2865-266 93 50 Fax: +49-2865-8133 qm@funke-medical.de www.funke-medical.de