

carlett.

ENJOY THE ECOMOTION

LT



Comfort



ASSIST

lietuvių

Instrukcijos

Dėkojame, kad įsigijote šį „Carlett“ produktą. Nepamirškite išsaugoti čekio, nes jis yra vienintelis garantijos įrodymas, jei produktas turi defektų.

Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl netinkamo produkto naudojimo, taip pat įprastam tam tikrų produkto dalių (ratų ir audinių) nusidėvėjimui.

Perskaitykite instrukcijas, kad žinotumėte, kaip tinkamai naudoti vaikštynę, prieš naudojimą.

Tikimės, kad mėgausitės produktu, kurio paskirtis yra padėti pagerinti naudotojo gyvenimo kokybę.


Ačiū!

„Assist“, patogus apsipirkimas ir sėdėjimas

LT


„Assist“ vaikštyne leidžia naudotojui apsipirkti ir vaikščioti negalvojant apie galėjamą atsisėti ar pailsėti, kai būtina.

Produktas turi apsauginį ar stovėjimo stabdį, kuris yra labai svarbus norint naudoti vaikštynę kaip kėdutę. Norėdami aktyvuoti apsauginį stabdį, patraukite stabdžio svirtį žemyn. Norėdami išjungti stabdį ir judėti toliau, pastumkite svirtį į priekį (žr. paveiksluką Nr. 1).

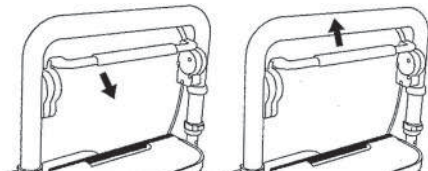

Paveikslukas Nr. 1. Apsauginis stabdys


Jis pasižymi momentine stabdymo sistema, kuri yra aktyvuojama traukiant rankomis, kol vaikštynė sustoja. Norėdami ją išjungti ir/ar eiti toliau, tiesiog nustokite traukti svirtį žemyn (žr. paveiksluką Nr. 2).

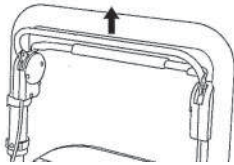

Paveikslukas Nr. 2. Momentinis stabdys


Produktas taip pat turi sistemą, leidžiančią reguliuoti dviejų priekinių ratų sukimosi kampą pagal jūsų poreikius.

Ratus galima užfiksuoti, kad sukėtųsi 90° ar 360° kampu. Norėdami pakeisti sukimosi laipsnį, spauskite reguliavimo mechanizmą, esantį ant priekinio rato, ir sureguliuokite pagal poreikį (žr. paveiksluką Nr. 3).

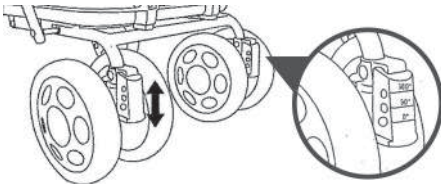

Paveikslukas Nr. 3. Besisukantys ratai

Taip pat yra rankenos aukščio reguliavimo mechanizmas su trimis padėtimis. Norėdami pakeisti aukštį, išimkite blokatorius iš skylių, esančių rankenos kairėje ir dešinėje, perkelkite juos į pageidaujamą aukštį ir įstatykite į atitinkamas skylės abejose pusėse (žr. paveiksluką Nr. 4).

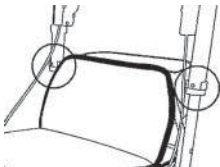


Paveiksliukas Nr. 4.
Reguliuojama rankena



Paveiksliukas Nr. 5. Skėčio laikiklis

LT

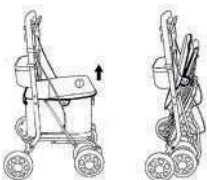

Paveiksliukas Nr. 6.
Sulankstymo sistema

Vaikštyne turi skėčio laikiklį, kurį galima pritvirtinti dirželiu (žr. paveiksliuką Nr. 5).

Kad sulankstytumėte ir padėtumėte produktą į laikymo vietą, jums tereikia pakelti sėdynę į viršų (žr. paveiksliuką Nr.6).

Produktas taip pat turi išimamą vidinį krepšį su rankenomis, kurį lengva valyti.

Medžiaga

- Važiuoklė: aliuminis
- Audiniai: poliesteris

- Ratai: EVA medžiaga (dėl šios medžiagos ratai yra tylūs, net važiuojant nelygiu paviršiumi).
- Padangos: polipropilenas

Specifikacijos

- Išlankstytas produktas: 65 ilgis x 52.5 plotis x 88.5 aukštis – 98.5 cm
- Sulankstytas produktas: 37 ilgis x 52.5 plotis x 89 aukštis, cm
- Sėdynės dydis: 35.5 plotis x 30 ilgis, cm
- Maksimali sėdynės apkrova: 125 kg
- Maksimali išimamo vidinio krepšio apkrova: 15/ 36 L kg
- Grynasis važiuoklės svoris: 7 kg

Priežiūra

Naudokite sausą šluostę kasdienei priežiūrai. Jei reikia nuvalyti dėmes, rekomenduojame naudoti neutralų ploviklį ir nuvalyti dėmes ranka.

Norint prailginti produkto tarnavimo laiką, reikėtų nusausti važiuoklę sausa šluoste po lietaus ar kontakto su vandeniu.

Nekeiskite ir neardykite produkto patys, nes galite sukelti gedimus ir produktas nebebus saugus naudoti.

Rekomendacijos

Vaikštyinė atitinka EB direktyvos: medicinos prietaisų direktyvos (ES) 2017/745 pagrindinius reikalavimus ir aktualias nuostatas. Įmonė nėra atsakinga už produkto naudojimą ne pagal numatytą paskirtį.

Nejudinkite vaikštyinės, kai žmogus sėdi ant jos sėdynės.

Maksimalus svoris, kurį krepšys gali išlaikyti, yra 15 kilogramų. Neperkraukite krepšio, net jei maksimalus svoris nebuvo pasiektas. Visuomet dėkite sunkesnius objektus į krepšio apačią.

Būkite itin atsargūs, kai naudojate produktą ant rampos ar nuokalnės, ypač jei vaikštyinėje yra daiktų. Nepamirškite naudoti stabdžio, kad suvaldytumėte vaikštynę.

Būkite itin atsargūs naudodami vaikštynę ant šlapios ar slidžios žemės.

Patikrinkite, ar apsauginis/stovėjimo stabdys yra įjungtas prieš naudodami kaip kėdutę.

Produktas nėra žaislas. Neleiskite vaikams naudoti ir/ar lipti ant produkto.



Nenaudokite vaikštyinės augintinių gabenimui.

Nelaikykite vaikštyinės drėgnose, labai karštosiose vietose, tiesioginėje saulės šviesoje, nes tai gali sutrumpinti produkto tarnavimo laiką.

carlett.

ENJOY THE ECOMOTION

Av. Meridiana 350, 8D
08027 Barcelona
Ispanija

 (+34) 930 160 036
 info@carlett.com

www.carlett.com