



MOPEDIA

Vaikštynių naudojimo instrukcija

TURINYS

1. KODAI	p.12
2. ĮVADAS	12 psl
3. PASKIRTIS	12 psl
4. EB ATITIKTIES DEKLARACIJA	12 psl
5. ĮSPĖJIMAI	13 psl
5.1 Bendrieji įspėjimai	13 psl
5.2 Įspėjimai dėl naudojimo.....	13 psl
5.3 Stabilumo įspėjimai.....	13 psl
5.4 Surinkimo įspėjimai.....	13 psl
6. PRIEŠ NAUDOJANT	13 psl
7. SURINKIMO INSTRUKCIJA	14 psl
7.1 Prieš surenkant gaminį	psl. 14
8. SURINKIMAS	14 psl
8.1 Išimkite vaikštynę	14 psl
8.2 Stūmimo rankenų surinkimas	14 psl
8.3 Rankenų reguliavimas	14 psl
8.4 Vaikštyinės suglaudimas	14 psl
8.5 Padėklas (tik RP685B ir RP690B)	14 psl
8.6 Krepšelis (skirtas RP685B - RP690B - RP691)	15 psl
8.7 Krepšys (tik RP685B)	15 psl
8.8 Sėdynė (tik RP680 - RP687 - RP690B - RP691)	15 psl
9. KAIP NAUDOTI	15 psl
10. STABDŽIAI	15 psl
10.1 Stabdyti	15 psl
10.2 Norėdami užfiksuoti ratus	15 psl
10.3 Norėdami atrakinti ratus	15 psl
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	15 psl
12. VALYMAS	16 psl
13. RATŲ PRIEŽIŪRA	16 psl
14. TECHNINĖS SAVYBĖS	16 psl
15. ATSARGINĖS DALYS / PRIEDAI	17 psl
16. GARANTIJA	17 psl
16.1 Remontas.....	17 psl
16.2 Atsarginės dalys	18 psl
16.3 Išimtyms	18 psl

CE I klasės medicinos prietaisai pagal direktyvą 93/42/EEBir vėlesnius pakeitimus

1. Kodai

RP520	Keturių ratų vaikštyinė iš aliuminio su sėdyne ATLANTE
RP685B	3 ratų vaikštyinė iš plieno CRYO
RP690B	4 ratų vaikštyinė iš plieno – mėlynos spalvos DYONE
RP691	Keturių ratų vaikštyinė iš plieno su porankiais ERA

2. Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote MORETTI SpA vaikštynę MOPEDIA, skirtą padėti žmonėms, turintiems judėjimo sunkumų patalpose ir lauke, kelionės metu ar kasdiniame gyvenime. Produkcija pagaminta pagal aukščiausius kokybės ir saugos standartus pagal Europos medicinos prietaisų direktyvą (93/42/EEB).

Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiami patarimai, kaip tinkamai naudoti ir užtikrinti jūsų saugumą. Prieš naudodami rekomenduojame atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Jei kyla abejonių, susisiekite su pardavėju.

Pastaba: Patikrinkite visas dalis, kad įsitikintumėte, jog nėra gabenimo pažeidimų. Atsiradus gabenimo pažeidimams, nenaudokite. Norėdami gauti daugiau instrukcijų, susisiekite su pardavėju.

3. Paskirtis

Ši vaikštyinė tinka žmonėms, turintiems judėjimo problemų. Gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė, palengvinanti judėjimą, arba net kaip ambulatorinė priemonė su pagalba. Bet koku atveju jo negali naudoti žmonės, kurių rankos ar plaštakos funkcija yra sutrikusi, netgi žmonės, turintys pusiausvyros problemų. Vaikštynę galima naudoti viduje ir lauke. Rekomenduojame naudoti ant lygaus paviršiaus, kur ratukai gali pasiekti žemę. Jo negalima naudoti ant akmenuotos žemės arba nuožulnios vietovės, nes vaikštyinė gali būti nestabili. Įrenginys nėra skirtas žmonėms ar daiktams vežti.



ĮSPĖJIMAS!

Nenaudokite gaminio šiame vadove nenurodytam tikslui. Moretti Spa neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias pasekmes, kilusias dėl netinkamo šio gaminio naudojimo ir dėl neleistino gaminio remo pakeitimo. Gamintojas gali modifikuoti įrenginį arba naudojimo instrukciją be išankstinio įspėjimo.

4. Atitikties deklaracija

„Moretti SpA“, prisiimdama visišką atsakomybę, pareiškia, kad „Moretti SpA“ pagamintas ir parduodamas gaminys, priklausantis vaikštynių asortimentui, atitinka Europos medicinos prietaisų direktyvą (93/42/EEB). „Moretti SpA“ garantuoja ir prisiimdama atsakomybę deklaruoja, kad:

1. Aptariamieji prietaisai atitinka esminius reikalavimus, reikalaujamus I^o direktyvos 93/42/EEB dėl korpuso, kaip nustatyta pirmiau minėtos direktyvos VII^o priede.
2. Aptariamieji prietaisai NĖRA MATAVIMO PRIETAISAI.
3. Aptariamieji prietaisai NETURI KLINIKINIŲ ZONDŲ.
4. Aptariamieji įrenginiai parduodami su NESTERILIA DĖŽE.
5. Aptariamieji įrenginiai priklauso I^o klasei.
6. NEGALIMA naudoti ir montuoti įrenginių, išskyrus Moretti SpA
Moretti SpA pateikia techninius dokumentus atitinkamoms institucijoms, kad įrodytų įrenginio 92/42/EEB atitiktį.

7. Moretti SpA tvarko ir teikia institucijoms techninę dokumentaciją, įrodančią, kad ji atitinka Europos medicinos prietaisų direktyvą (93/42/EEB).

5. Įspėjimai

5.1 Bendrieji įspėjimai

- NEMONTUOKITE ir NENAUDOKITE įrenginio neperskaitę ir nesupratę šio vadovo; Jei negalite suprasti įspėjimų, perspėjimų ar nurodymų, prieš pradėdami montuoti šią įrangą susisiekite su sveikatos priežiūros specialistu arba techniniu personalu siekiant išvengti sužalojimų ar žalos;
- Vaikštynę turėtų naudoti pacientai, neturintys motorinių sutrikimų, taip užtikrinant priemonės naudojimą be rizikų
- Pasitarkite su gydytoju arba terapeutu, kad nustatytumėte teisingą koregavimą ir teisingą naudojimą;
- Gydytojas arba terapeutas turėtų padėti sureguliuoti tinkamą aukštį, kad būtų užtikrinta maksimali atrama, kad stabdžiai būtų tinkamai įjungti ir kad būtų galima atlikti bendrą surinkimą;
- Vaikštyinės nėra skirtos naudoti kaip savaeigiai įtaisai.

5.2 Įspėjimai dėl naudojimo

- Užtikrinkite, kad stabdžių trosas būtų tinkamai nustatytas;
- Patikrinkite, ar tinkamai veikia stabdžiai po kiekvieno aukščio reguliavimo, kad išvengtumėte laisvo troso išlenkimo;
- Šių paprastų taisyklių pažeidimas gali sukelti asmeninę žalą;
- Vaikštynę galima naudoti tik ant kieto, lygaus paviršiaus. Nenaudokite vaikštyinės lipdami laiptais
- Visada atsiremkite į abi rankenas, kad išlaikytumėte pusiausvyrą;
- Ypatingą dėmesį atkreipkite į šlapią, apledėjusią ar apsnigtą dangą;
- Neperkraukite vaikštyinės;
- Nenaudokite vaikštyinės sėdynės (jei yra) žmonėms ar daiktams vežti, sėdynė skirta atsiremti naudotojui su įjungtu stovėjimo stabdžiu;
- Visi ratai turi liestis su grindimis bet kuriuo naudojimo metu, kad būtų užtikrintas tinkamas vaikštyinės veikimas, balansavimas ir maksimalus saugumas;
- Prieš naudojant sėdynę, reikia įjungti stabdžius.

Pastaba Kai vaikštynę naudojamas pastovioje padėtyje, rankinis stabdys turi būti užfiksuotas

5.3 Stabilumo įspėjimai

- Vaikštynę gali suteikti ambulatorinę pagalbą asmeniui, sveriančiam iki 136 kg, ĮSKAITANT pirkinių krepšelį;
- Vaikštyinės krepšio svoris yra 5 kg.

5.4 Surinkimo ir suglaudimo įspėjimai

- Patikrinkite, ar abu rankenos atraminiai vamzdeliai yra tinkamai įkišti į rėmą ir pritvirtinti fiksavimo rankenėlėmis, užfiksuotomis laikiklyje pagrindinėmis sparninėmis veržlėmis ir rankenėlėmis nejudant;
- Abu rankenos vamzdeliai be jokių judesių saugiai užfiksuoti pagrindinėje atraminėje dalyje sparninėmis veržlėmis ir rankenėlėmis;
- Nieko nekabinkite ant vaikštyinės rėmo, kad išvengtumėte vamzdelių iškraipymų kai vaikštynę yra išskleista ir galite sugadinti stabilumą. Dėl iškraipymų taip pat galima susižaloti;
- Saugokitės, kad atidarant ir uždarant neįstrigtų pirštai ir (arba) drabužiai.

6. Prieš naudojimą

Prieš naudodami prietaisą, visada patikrinkite:

1. Kad visos vaikštyinės dalys būtų saugiai užfiksuotos;
2. Patikrinkite, ar visi varžtai priveržti;
3. Įsitinkinkite, kad sėdynė tinkamai užfiksuota
4. Patikrinkite, ar tinkamai įdėtas sėdynės fiksatorius;
5. Patikrinkite, ar tinkamai veikia stabdžiai ir įprasti stabdžiai.

7. Surinkimo instrukcijos

71 Prieš surenkant gaminį

Išpakuokite gaminį ir patikrinkite, ar gabenimo metu nebuvo pažeista. Jeigu vaikštyinė yra pažeista, kreipkitės į artimiausią parduotuvę.

8. Surinkimas

81 Išimkite vaikštynę

RP520 – RP690B – RP691

Atidarykite vaikštynę, traukdami priekinę rėmo dalį, paspaudę ant kojų

RP685B

Atidarykite vaikštyinės rėmą ir nuspauskite armatūros strypą priekinėje dalyje žemyn.

82 Stūmimo rankenų surinkimas

Įdėkite rankenos vamzdelius į rėmą. Sukite fiksavimo rankenėles, kol jos užsifiksuos.

83 Rankenėlių reguliavimas

Sureguliuokite rankenų aukštį naudodami šonines rankenėles. Atsukite rankenėlę, padėkite rankenas į norimą aukštį, pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte ir vėl pritvirtinkite. Pakartokite su kita rankena ir įsitinkinkite, kad abi rankenos yra viename aukštyje.



ĮSPĖJIMAS! Įsitinkinkite, kad rankena atitinka vaikštyinės judėjimo kryptį. Jei rankena nelieta tiesi, kyla pavojus, kad vaikštyinė klibės arba apvirs, ypač jei ji stumsite stipriau.

84 Vaikštyinės sulankstymas

RP520 – RP690B – RP691

Padarykite svirtį ant šoninių strypų ir grąžinkite vežimėlio priekį atgal

RP685B

Išimkite dėklą, krepšelį, krepšį, patraukite sustiprintą svirtį į vidų ir sulenkite vaikštynę.

85 Padėklas (tik RP685B ir RP690B)

Padėklas skirtas tik mažiems daiktams palaikyti.



ĮSPĖJIMAS! Ant padėklo nedėkite karštų, aštrių ar sunkių daiktų.

Norėdami pritvirtinti padėklą prie rėmo, įdėkite atramas, esančias padėklų gale, į atitinkamus lizdus sėdynėje. (tinka tik RP690B modeliui)

86 Krepšelis (skirtas RP685B – RP690B – RP691)

Pirkinių krepšelis pakabinamas ant vaikštyinės rėmo.



ĮSPĖJIMAS! Vaikštynę naudokite tik smulkiems daiktams. Neperkraukite krepšio, kad išvengtumėte disbalanso ir pavojaus apvirsti.

87 Krepšys (tik RP685B)

Krepšys tvirtinamas prie vaikštyinės rėmo per segtukus.



ĮSPĖJIMAS! Maksimali krepšio talpa 5 kg. Krepšį naudokite tik smulkiems daiktams. Neperkraukite maišo, kad išvengtumėte disbalanso ir pavojaus apvirsti.

88 Sėdynė (tik RP520 – RP690B – RP691)

Prieš sėdėdami, padėkite vaikštynę ant lygaus ir kieto paviršiaus ir užfiksuokite stabdžius. Įsitinkinkite, kad stabdžiai yra patikimai užfiksuoti ir ar vaikštyinė yra stabilioje padėtyje.



ĮSPĖJIMAS! Atsisėskite paskirstydami savo svorį ant sėdynės. Vienu metu nesėdėkite ir nestumkite vieno šono.

9. Kaip naudoti

- Pradėkite stumti, kai esate vertikaloje padėtyje, abiem rankomis laikydami rankeną;
- Prieš naudodami vaikštynę įsitinkinkite, kad rankos yra sausos, kad išvengtumėte paslydimo;
- Vaikščioti išlaikant vertikalią padėtį, kai akys nukreiptos į priekį, o ne žemyn;
- Nestumkite vaikštyinės per toli nuo kūno, nes tai gali sukelti kritimą ir netinkamą apkrovą;
- Nenaudokite vaikštyinės aukštesniems nei 20 mm žingsniams įveikti;
- Naudojant lauke, pageidautina, kad šaligatviai būtų tinkamai paruošti pagal architektūrinių kliūčių šalinimo taisykles

10. Stabdžiai

101 Stabdyti

Norėdami stabdyti vaikštynę, traukite stabdžių svirtį pirštais aukšty, kol vaikštyinė sulėtės arba sustos. Norėdami toliau judinti vaikštynę, atleiskite stabdžių rankenas.

102 Ratams užrakinti

Delnu nuspauskite stabdžių svirtį, kai išgirsite spragtelėjimą, kad ratai užsiblokuoja.



ĮSPĖJIMAS! Kai naudotojas stovi, stabdžiai turi būti užfiksuoti

103 Norėdami atrakinti ratus

Traukite abi stabdžių svirtis, kol jos atsiblokuos

11. Priežiūra ir priežiūra

Rinkoje esantys Moretti SpA įrenginiai MOPEDIA yra kruopščiai patikrinti ir pažymėti CE ženklu. Dėl paciento ir gydytojo saugumo rekomenduojama patikrinti gamintojas arba

patvirtinta laboratorija ne rečiau kaip kas dvejus metus patikrina, ar jūsų vaikštynė tinkama naudoti. Jei reikia remontuoti, naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus. Gaminio naudingo tarnavimo laikas priklauso nuo naudojimo, priežiūros, laikymo ir valymo.





























12. Valymas











Dalims valyti naudokite tik drėgną šluostę su neutraliu plovikliu, nenaudokite valiklių, kuriuose yra tirpiklių ir metalinių šepėčių, abrazyvinių ar aštrių daiktų, nes galite sugadinti gaminį.

13. Ratų priežiūra

1. Nuvalykite ratus šiltu vandeniu ir švelniu plovikliu. Nusausinkite švaria šluoste.
2. Periodiškai sutepkite ratus.

14. Techninės savybės

Serija ATLANTE										
Prekės kodas	520 RP									
Sėdynė	38x34 cm									
Rėmas	Aliuminis									
Svoris ir matmenys										
Matmenys (cm)										 MAX Svoris
520 RP	69	81 96	56	61	44	36	7,4	20	20	136 kg
Serija CRYO										
Prekės kodas	RP685B - mėlyna									
Sėdynė	Be sėdynės									
Rėmas	Plienas									
Svoris ir matmenys										
Matmenys (cm)									 MAX Svoris	
RP685B	56	81 96	66	33	28	7,3	20	20	136 kg	
Serija DYONE										
Prekės kodas	RP690B - mėlyna									
Sėdynė	38x16 cm									
Rėmas	Plienas									
Svoris ir matmenys										
Matmenys (cm)										 MAX Svoris
RP690B	64	75 98	61	60	44	31	10	20	20	136 kg

Serija ERA										
Prekės kodas	RP691									
Sėdynė	38x16 cm									
Rėmas	Plienas									
Svoris ir matmenys										
Matmenys (cm)										
RP691	64	100 122	61	60	44	31	10	20	20	136 kg

15. Atsarginės dalys/priedai

Atsarginių dalių ir priedų ieškokite Moretti SpA pagrindiniame kataloge.

16. Garantija

Moretti gaminius suteikiama 2 metų garantija dėl medžiagų ar gamybos gedimų nuo įsigijimo datos, išskyrus galimus apribojimus arba išimtis, kaip nurodyta toliau. Garantija negalioja, jei žala atsirado dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo ar dalių pakeitimo, o garantija negalios, jei nebus griežtai laikomasi naudojimo instrukcijų.

Tinkamas naudojimas nurodytas šiame vadove.

Moretti neatsako už netiesioginę žalą, kūno sužalojimus ar bet kokią kitą žalą, atsiradusią dėl neteisingo įrengimo ar netinkamo įrenginio naudojimo.

Moretti nesuteikia garantijos už žalą, atsiradusią dėl šių sąlygų: stichinės nelaimės, neautorizuotos priežiūros ar remonto, gedimų, atsiradusių dėl elektros tiekimo problemų (jei reikia), atsarginių dalių, kurių neregamentuoja Moretti, naudojimas, netinkamas naudojimas, neleistinas pakeitimas, siuntimo pažeidimas (skirtingi nuo originalios Moretti siuntos) arba netinkamos priežiūros, kaip nurodyta vadove, atveju.

Garantija netaikoma komponentams, kurie susidėvi tinkamai naudojant įrenginį.

16.1 Remontas

Garantinis remontas: Jei garantiniu laikotarpiu Moretti prekė turi medžiagų ar gamybos defektų, Moretti kartu su klientu įvertins, ar gedimas gali būti padengtas garantija. Moretti savo nuožiūra gali pataisyti arba pakeisti prekę pati arba kartu su Moretti atstovu. „Moretti“ gali padengti darbo sąnaudas, jei remontas yra padengtas garantija. Remontas ar pakeitimas nepratęsia garantijos.

Remontas netaikomas garantijai: Prekė be garantijos gali būti grąžinta gavus Moretti autorizaciją. Vonios keltuvo, kuriam taikoma garantija, darbo ir siuntimo išlaidas apmoka klientas arba pardavėjas. Remontui suteikiama 6 mėnesių garantija nuo prekės gavimo.

Prietaisas be defektų: Klientas bus informuotas, jei po įrenginio grąžinimo ir patikrinimo Moretti pareiškės, kad įrenginys nėra sugedęs. Tokiu atveju prekė bus išsiųsta atgal klientui, o siuntimo mokesčių turės sumokėti klientas.

162 Atsarginės dalys

Originalioms Moretti atsarginėms dalims suteikiama 6 mėnesių garantija nuo gavimo datos.

163 Išimties

„Moretti“ nesiūlo jokių kitų aiškių ar numanomų deklaracijų, garantijų ar sąlygų, įskaitant galimas deklaracijas, garantijas ar tinkamumo parduoti, tinkamumo konkrečiam tikslui, nepažeidimo ir nesikišimo sąlygas, visų, išskyrus tai, kas aiškiai nurodyta šioje garantijoje. Moretti negarantuoja nenutrūkstamo ir nepriekaištingo naudojimo. Galimų numanomų garantijų, kurios gali būti nustatytos pagal įstatymą, trukmę riboja garantinis laikotarpis, įstatymo ribose. Kai kuriose valstybėse ar šalyse neleidžiama apriboti netiesioginės garantijos arba išimties arba apribojimų dėl atsitiktinių pažeidimų. Tokiose šalyse kai kurios išimties ir apribojimai vartotojui negali būti taikomi. Ši garantija gali būti pakeista be išankstinio įspėjimo.



GARANTIJOS SERTIFIKATAS

Produktas _____

Pirkimo data _____

Įgaliotas pardavėjas _____

Gatvė _____ Vieta _____

Pirkėjas _____

Gatvė _____ Vieta _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) www.morettispa.com

PAGAMINTA PRC

