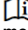



# Naudojimo instrukcija

## Hyper AIR *hybrid*

Atvirų celių čiuzinys aukštai pragulų rizikai  
Prieš naudodamiesi sistema atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir atkreipkite dėmesį į  
įspėjimus!

Gaminio pavadinimas	Hyper AIR <i>hybrid</i>
Pakuotės sudėtis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Čiuzinys aukštai pragulų rizikai su putų poliuretano užpildu</li><li>• Užvalkalas iš poliuretano (nuvelkamas su užtrauktuku)</li><li>•  Vartotojo instrukcijas kitomis kalbomis galite rasti: <a href="http://manuals.funke-medical.eu">manuals.funke-medical.eu</a></li></ul>
Indikacijos / taikymo sritis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pragulų profilaktikai</li><li>• Pragulų gydymas iki 4 lygio (pagal Seiler / EPUAP)</li><li>• Skausmo gydymui</li><li>• Asmenims, kuriems yra didelė pragulų rizika</li></ul>
Kontraindikacijos	Nežinomos
Leidžiamas naudotojo svoris min. – maks.	0 - 250 kg
Medžiaga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Užpildas: poliuretano putos</li><li>• Oro celės: PU plėvelė, PU putos</li><li>• Užvalkalas: poliuretanas dengtas polietersulfonu</li></ul>
Išmatavimai	Plotis: 90 - 120 cm; Ilgis: 190 – 200 cm; Aukštis: 16 cm.
Gaminio svoris	12 kg (90/190 cm), 13 kg (90/200 cm), 14 kg (100/200 cm), 16 kg (120/200 cm)
Pagalbos numeris (pagal §139 SGB V)	11.29.09.0005
Medicinos priemonė	Klasė 1, MDR 2017/745 
Techninė sauga / antipireninės savybės	Antipireninių savybių tyrimas atliktas pagal DIN EN 597 I + II, BS 7175 sec 3 crib 5, BS 7177
Toksikologinio kenksmingumo tyrimas / biologinis suderinamumas	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Įspėjimai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prieš pradėdami sistemą naudoti pirmą kartą, turite paruošti sistemą pirmajam naudojimui (žr. Sistemos paruošimas naudojimui).</li><li>• Tinka reguliuojamiems gulimiesiems paviršiams</li><li>• Viršutinis šoninių turėklų kraštas turi būti bent 22 cm virš neapkrauto čiuzinio viršaus</li></ul>
Garantija	5 metai dėl putų poliuretano užpildo
Techninė priežiūra	Neatliekama
Valymo instrukcija (čiuzinio užvalkalas)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Užvalkalą galima valyti šluoste, naudojant dezinfekavimo priemones, pagamintas iš izopropanolio (pvz.: Bacillol) arba naudojant kitus DGHM sąraše nurodytus produktus (pvz.: ECOLAB valymo šluoste Incidin OxyWipe S XL). Galimas cheminis ir valymas karščiu.</li><li>2. Alternatyvus valymas įstaigose: užvalkalas gali būti dezinfekuojamas autoklave pagal RKI rekomendacijas. DĖMESIO: jeigu matomų nešvarumų pašalinti neįmanoma, užvalkalą reikia utilizuoti pagal atliekų tvarkymo taisykles.</li></ol> 
Valymo instrukcija (užpildas)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Putų poliuretano užpildą galima valyti parduodamomis valymo priemonėmis. Užpildą galima mirkyti į valymo tirpalą arba apipurkšti dezinfekavimo priemone (pvz.: Bascillol arba ECOLAB putų puršikliu Incidin OxyFoam S, kurio sudėtyje yra vandenilio peroksido). Po valymo leiskite užpildui išdžiūti savaime.</li><li>2. Alternatyvus valymas įstaigose: užvalkalas gali būti dezinfekuojamas autoklave pagal RKI rekomendacijas. DĖMESIO: jeigu matomų nešvarumų pašalinti neįmanoma, užvalkalą reikia utilizuoti pagal atliekų tvarkymo taisykles.</li></ol>
Sistemos paruošimas naudojimui	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gaminys tinkamas naudoti namuose ir įstaigose.</li><li>2. Gavę čiuzinį iš karto išimkite iš dėžės.</li><li>3. Padėkite čiuzinį ant lovos. Atkreipkite dėmesį į įspaudą „ŠIA PUSE Į VIRŠŲ“ ant čiuzinio viršaus, vožtuvą turi būti prie galvūgalio.</li><li>4. Patraukdami atidarykite vožtuvą ir palaukite maždaug 5 minutes, kol oro elementai patys išsipūs. Tuomet paspausdami uždarykite vožtuvą.</li><li>5. Paguldykite naudotoją ant čiuzinio. Traukdami mėlyną dangtelį švelniai atidarykite vožtuvą, kad oras išeitų ir tuo pačiu metu atlikite pirštų testą: pakiškite pirštą po sėdmenimis. Optimalus komfortas gulint pasiekiamas kai galimi tik nedideli 1 – 2,5 cm mažojo piršto judesiai. Paspausdami mėlyną dangtelį vėl uždarykite vožtuvą.</li><li>6. Rekomenduojama kasdien tikrinti, ar teisingai užpildytos oro kameros, gali būti reikalinga pakartotinai sureguliuoti.</li></ol>

RKI = Roberto Kocho institutas; DHGM = Vokietijos higienos ir mikrobiologijos draugija; Autoklavavimas = frakcionuotas vakuuminis procesas 105 °C temp. 55 min.

 Gamintojai, kaip apibrėžta MDR 2017/745

Funke Medical GmbH Ährenfeld 10 46348 Raesfeld Tel.: +49-2865-266 93 50 Fax: +49-2865-8133 qm@funke-medical.de www.funke-medical.de