

DongBang Medical akupunktūrinių adatų naudojimo instrukcija

Paskirtis, indikacijos:

Šis gaminys yra skirtas naudoti akupunktūrai arba terminiam apdorojimui moksa. Šis gaminys skirtas naudoti tik įgaliotiems gydytojams (specialistams).

Atsargumo priemonės naudojant:

- Nėščios moterys (tai gali paskatinti gimdymą);
- Pacientai, sergantys piktybiniais navikais (gali pagreitinti piktybinių navikų augimą arba metastazę);
- Pacientai, sergantys hemoragine liga (tai gali sukelti kraujavimą);
- Pacientai, alergiški metalams, tokiems kaip nikelis, chromas ir kiti nerūdijančio plieno komponentai.

Naudojimo būdas: Su adatomis elkitės atsargiai, kad nesusižeistumėte, nes adatos yra aštrios.

- 1) Įsitinkite, kad sterili pakuotė nėra pažeista, užteršta ar šlapia, ir nenaudokite, jei ji tokia yra.
- 2) **Vienkartinis naudojimas:** šios DongBang adatos yra sterilizuotos ir skirtos tik vienkartiniam naudojimui. Pakartotinis jų naudojimas padidina infekcijos riziką.
- 3) **Dezinfekcija:** Dezinfekuokite akupunktūros vietą alkoholiu suvilgyta vata ar pan. ir leiskite išdžiūti prieš įdėdami adatą.
- 4) **Vizuali apžiūra:** prieš naudodami būtinai apžiūrėkite adatą. Nenaudokite jos, jei matote kokių nors nelygumų, tokių kaip susisukimas ar pažeidimas.
- 5) **Pakuotės atidarymas ir produkto išėmimas:** atidarydami pakuotę ir išimdami adatą, laikykite už rankenos neliesdami adatos tiesiogiai plikomis rankomis.
- 6) **Įdūrimas:** atlikdami akupunktūrą įveskite adatą ne daugiau kaip 2/3 adatos ilgio (pvz. adatos ilgis 60mm, ją įvesti reikia ne daugiau nei 40mm.). Adatų gylis ir kampas turi būti kruopščiai parinkti, kad nebūtų pažeisti organai ir nervai.
- 7) **Po naudojimo:** Saugiai išmeskite adatas, kad išvengtumėte infekcijos. Jei atidarius pakuotę adatos nenaudojamos, nenaudokite ir tinkamai išmeskite.
- 8) **Moxa terminis apdorojimas:** Moxa terminiam apdorojimui naudokite tik adatas su metalinėmis rankenomis. Gydyimo metu pasirūpinkite, kad išvengtumėte vietinių nudegimų ir užtikrintumėte tinkamą patalpų vėdinimą. • Nedėkite adatos ir dangtelio arti ugnies. Adata gali susisukti, o dangtelis gali nudegti.
- 9) **Elektrinis gydymas:** Jei adatas naudojate elektroakupunktūrai, nepalikite ilgiau nei 30min adatų įvestų į kūną, nes tai gali sukelti adatos koroziją ar adata gali nulūžti.

Nepageidaujamos reakcijos: Pacientas gali jausti skausmą, niežėjimą, mieguistumą, negalavimą, pykinimą ir mikroskopinį kraujavimą.

Laikymo būdas: Adatas laikykite saugioje vietoje, atokiau nuo vandens nutekėjimo, tiesioginių saulės spindulių, didelės drėgmės ir aukštos temperatūros, cheminių medžiagų ir vaikų.

Galiojimo data: Galiojimo laikas nurodytas ant dėžutės. Prieš naudodami patikrinkite galiojimo datą ir nenaudokite pasibaigusio produkto.