

Naudojimo instrukcija

Pažastinis ramentas

Modelis:UN8009 (L、M、S)




Prieš naudodami atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

● Naudojimas

Naudojamas kaip pagalbinė priemonė vaikščiojimui ar pacientams, kuriems yra sutrikusi stovėjimo funkcija ir reabilitacijos treniruotėms.

● Sudedamosios dalys

Pagamintas iš pagrindinio atraminio vamzdžio, vidurinio atraminio vamzdžio, reguliuojamo vamzdžio, pažasties atramos, rankenos ir antgalio.

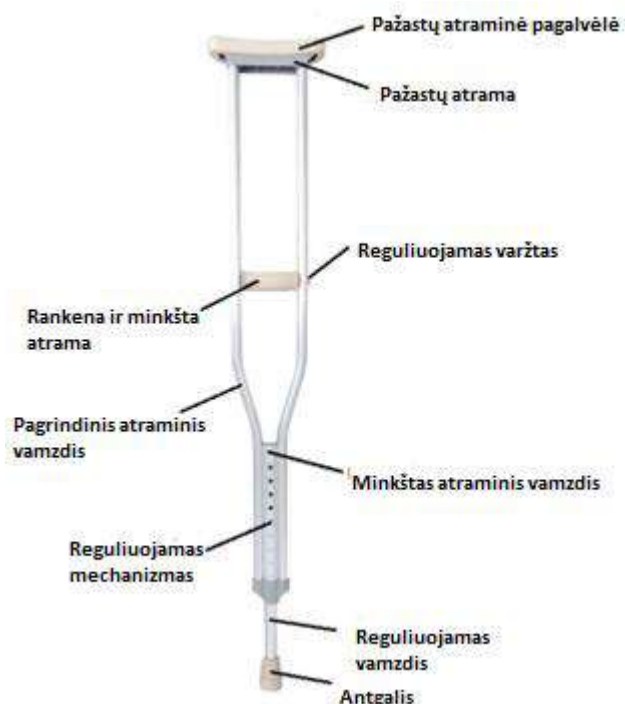

● Modelis

Pagal skirtingus tipus ir dydį gaminį galima suskirstyti į šiuos modelius:

Modelis	UN8009-L	UN8009-M	UN8009-S
Dydis	L	M	S
Reguliuojamas aukštis(mm)	1290-1490	1090-1290	900-1105
Pastaba	Tolerancija ± 10 mm		

● Techniniai parametrai

1. Gaminio paviršius turi būti lygus ir glotnus, atplaišų, aštrių kampų, briaunų ir defektų, dėl kurių naudotojas gali susižeisti, arba sugadinti drabužius.
2. Aliuminis dengtas oksido plėvele neturi turėti akivaizdžių defektų – įbrėžimų, nudegimų, korozijos, dėmių, ar kitų defektų.
3. Plastikinių dalių paviršius turi būti lygus, vienodos spalvos, be defektų, pvz., įlenkimų, įtrūkimų ir akivaizdžių įbrėžimų.
4. Pažastinė atraminė dalis ir rankena turi pasižymėti elastingomis, neabsorbuojančiomis, neblunkančiomis, netoksiškomis ir neslystančiomis savybėmis.

5. Įvairios pažastinio ramento dalys turi būti pilnai surinktos, tiksliai suderintos, tvirtos ir patikimos, o įprasto naudojimo metu neturėtų sukelti nejprastų garsų.

6. Pažastiniai ramentai turi būti lanksčiai reguliuojami ir patikimai tvirtinami.

● Instrukcijos

1. Aukščio reguliavimas: vienu pirštu nuspauskite spyruoklinį mechanizmą, o kita ranka patraukite apatinį reguliavimo vamzdelį, kad sureguliuotumėte reikiamą aukštį. Galima rinktis iš 9 padėčių.

Pastaba: įsitikinkite, kad girdėjote spragtelėjimo garsą, rodantį, kad dvipusis spyruoklinis mezhanzas buvo sureguliuotas.

2. Rankenos tvirtinimas

Atsukite reguliavimo veržlę prieš laikrodžio rodyklę, ištraukite reguliavimo varžtą, nustatykite rankeną į tinkamą padėtį ir priveržkite reguliavimo veržlę. Galima rinktis iš 5 padėčių.

● Atsargumo priemonės

Simboliai, susiję su saugos reikalavimais, ir jų reikšmės

Simbolis	Reikšmė	Simbolis	Reikšmė
	Aukštyn		Dūžtantis
	Saugoti nuo lietaus		Patikrinti failą
	Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių		
	Nurodo, kad neteisingai naudojantis gali būti sužaloti žmonės arba patirti kitų nenumatytų sužalojimų.		

1. Prieš naudodami atidžiai patikrinkite visas dalis, o jei pastebėsite nejprastus požymius, pvz., antgalio nebuvimą, laiku jį pakeiskite.

2. Prieš naudodami įsitikinkite, kad dvipusis spyruoklinis mechanizmas yra sureguliuotas, jį galima naudoti tik tada kai pasigirsta spragtelėjimas.

3. Būkite ypač atsargūs naudodami jį slidžiuose keliuose ir pan.

4. Nedėkite gaminio į aukštos arba žemos temperatūros aplinką, kad plastikas ir guma nesusidėvėtų per anksti, o tai turėtų įtakos naudojimui.

5. Antgaliai yra keičiami kas 6 mėnesius, arba nustatomas atsižvelgiant į faktines naudojimo sąlygas.

Pastaba: bet kuriuo metu patikrinkite bet kokius naudojimo metu atsiradusius nukrypimus, pavyzdžiui, atsilaisvinusias dalis..

Įspėjimas: Nenaudokite pažastinio ramentų kaip alpinizmo ar savigynos priemonės.

● **Priedai ir priežiūra**

Sugedus gaminiui, krikpkitės į vietinį pardavėją, arba gamintoją. Gaminį turėtų taisyti profesionalūs techninės priežiūros darbuotojai. Neardykite ir neremontuokite be leidimo. (Pastaba: jei pakeisite ne gamintojų pateiktus priedus, tai gali turėti įtakos įprastam gaminio naudojimui).

● **Priežiūra**

1. Šis produktas reikalauja kasdienės priežiūros. Reikėtų reguliariai tikrinti kiekvienos jungties tvirtumą ir vientisumą; kasdien valyti vaikščiojimo rėmą minkštu audiniu ir palaikyti švarą.
2. Ilgą laiką nenaudojamą priemonę reikia išvalyti ir išdžiovinti.
3. Šį gaminį reikia laikyti patalpoje, kurioje yra ne didesnė kaip 80 % santykinė oro drėgmė, nekorozinių dujų, gerai ventiliuojamoje ir švarioje aplinkoje. Šį gaminį galima gabenti bendruoju transportu, vengiant didelių susidūrimų gabenimo metu.
4. Atliekas šalinkite laikydamiesi aplinkos apsaugos reikalavimų. Siekdami išvengti aplinkos taršos priemonės detalių neišmeskite, neužkaskite ir nedeginkite!

● **Garantinis aptarnavimas**

Garantija netaikoma:

A: Lengvai pažeidžiamoms ir sunaudojamoms dalims: kojų antgaliai, laikikliai;

B: Žalai, atsiradusiai dėl neautorizuotų asmenų gaminio ardymo, taisymo ir pertvarkymo;

C: Žalai, atsiradusiai dėl atsitiktinio kritimo naudojant arba tvarkant vaikščiojimo rėmą;

D: Netinkamam naudojimui, dėl kurio nukrenta dažų sluoksnis;

E: Žalai, atsiradusiai dėl naudojimo instrukcijų nesilaikymo;

F: Žalai atsiradusiai dėl nenuspėjamos stichinės nelaimės (pvz.: gaisro, žemės drebėjimo, potvynio ir kt.)

● **Atitikties deklaracija**

U-Nurse Medical visa atsakomybe pareiškia, kad pažastinis ramentas UN8009 atitinka reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.

● Ženklinimas

