

# **Intelect® Neo**

## **Multimodulinės fizioterapijos platformos vežimėlis**



**Įrengimo  
Instrukcijos**

## SUEDAMOSIOS DALYS

Šiame vadove esantys terminai „kairė“ ir „dešinė“ reiškia prietaiso puses iš vartotojo, stovinčio priešais įrenginį, perspektyvos.

Intellect® Neo klinikinė terapinė sistema suteikia galimybę pačiam vartotojui įdiegti įvairius modulius (išskyrus vakuumo). Šie moduliai specialiai sukurti naudoti kartu su Intellect® Neo multimoduline platforma, kad patenkintų visus gydytojo poreikius. Šios sistemos komponentai yra pavaizduoti žemiau.

Vežimėliui taip pat priklauso:

- Trys išimami stalčiai
- Šoninės kojos su ratukais
- Šešiakampis raktelis, 6 varžtai ir poveržlės

**Pastaba:** Intellect® Neo multimodulinę fizioterapijos platformą galima užsisakyti be vežimėlio, su plokščiu pagrindu, kaip pavaizduota žemiau.

Vežimėlis



Vežimėlis su įrengtu vakuumo moduliu



Viršus



Pagrindas

Moduliai



- 2 – jų kanalų elektrostimuliacinis
- 2 – jų kanalų elektrostimuliacinis + sEMG
- 4 – jų kanalų elektrostimuliacinis
- Lazerio
- Ultragarso
- Vakuomo (pavaizduota aukščiau esančioje iliustracijoje)

## PRIETAISO TVIRTINIMAS PRIE VEŽIMĖLIO

Pasirenkamas terapinės sistemos vežimėlis yra sukurtas naudoti tik su Intellect® Neo multimoduline fizioterapijos platforma. Šis vežimėlis leidžia lengvai transportuoti įrenginį, taip pat jame galima laikyti visus modulių priedus.

Reikalingi įrankiai (neįtraukti): atsuktuvai su kryžminiu ir plokščiu galu.

Išpakuokite Intellect® Neo multimodulinę fizioterapijos platformą. Iš karto pažiūrėkite, ar prietaisas neapgadintas. Apie apgadintą prietaisą nedelsdami praneškite vežėjui.

Norint pritvirtinti Intellect® Neo platformą prie vežimėlio, vadovaukitės šiais žingsniais:

1. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo, ištraukdami maitinimo laidą.
2. Iš vežimėlio išimkite viršutinį stalčių. Norint tai padaryti Jums reikia atidaryti stalčių. Paspauskite plastikinę apkabą vienu metu priešinga kryptimi taip, kaip parodyta. Dabar galite išimkite stalčių



3. Nuimkite pagrindą nuo platformos prieš tvirtinant įrenginį prie vežimėlio. Norint tai padaryti, Jums reikia atsukti 4 – ris varžtus iš apačios, kuriais pagrindas yra prisuktas prie platformos. Šiais varžtais Intellect® Neo platformą tvirtinsite prie vežimėlio.



4. Uždėkite platformą ant vežimėlio taip, kad ekranas ir stalčiai būtų toje pačioje pusėje.



5. Prisukite platformą prie vežimėlio 4 –iais varžtais, kuriais pagrindas buvo prisuktas prie platformos.



6. Jeigu norite, galite pakeisti rankenas. Kiekviena rankena prisukama 4 –iais varžtais kaip parodyta.



7. Įdėkite stalčių į buvusią vietą.

## KOJŲ TVIRTINIMAS/REGULIAVIMAS

Neo vežimėlį gaunate be pritvirtintų kojų. Norint pritvirtinti arba reguliuoti kojas prie vežimėlio, vadovaukitės pateiktais žingsniais:

Reikalingi įrankiai:

- 5 mm šešiakampis raktas (duota)
- Plokščios poveržlės, 6.35 mm vidinio diametro, 6 vienetai (duota)
- Šešiakampiai ¼-20 x 1-1/4" varžtai, 6 vienetai (duota)

1. Išimkite apatinį stalčių. Norint tai padaryti Jums reikia atidaryti stalčių. Paspauskite plastikinę apkabą vienu metu priešinga kryptimi taip, kaip parodyta. Dabar galite išimkite stalčių.



2. Galite rinktis iš dviejų vežimėlio aukščio nustatymų. Standartinis pavaizduotas kairėje ir žemesnis nustatymas – dešinėje. Pasirinkite norimą aukštį.



3. Kiekvieną koją prisukite trimis šešiakampiais varžtais, naudodami šešiakampį raktą.

**Pastaba:** Jeigu norėsite keisti aukštį, tiesiog atsukite ir ištraukite šešiakampius varžtus, pakeiskite kojų padėčių ir vėl varžtus prisukite.



4. Įdėkite apatinį stalčių.

## VEŽIMĖLIO SPECIFIKACIJOS

	Plotis	Gylis	Aukštis	Svoris
Ekranas, palenktas 45 <sup>o</sup> kampu, su pagrindu	40.4 cm	40.4 cm	56 cm	9.34 kg
Vežimėlis žemesnėje padėtyje (su ratukais)	60.8 cm	66.52 cm	69.6 cm	13.34 kg
Vežimėlis pakeltoje padėtyje (su ratukais)	60.8 cm	66.52 cm	76.6 cm	
Ekranas, 90 <sup>o</sup> kampu, su pakeltus vežimėliu	60.8 cm	66.52 cm	134.2 cm	22.18 kg