

Naudojimo instrukcija



GELSEAT® clinic

Sėdynės pagalvėlė nuo pragulų

Prieš naudodamiesi sistema, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir atkreipkite dėmesį į **įspėjimus!**

Gaminio pavadinimas	GELSEAT® clinic
Pakuotės sudėtis	Terapinė sėdynės pagalvėlė nuo pragulų su putplasčio užpildu ir poliuretano užvalkalu (nuvelkamas, su užtrauktuku), naudojimo instrukcija
Indikacijos / taikymo sritys	<ul style="list-style-type: none">• Pragulų profilaktika• Terapija nuo pragulų iki 4 lygio (pagal Seiler / EPUAP)• Skausmo terapija• Pacientams, turintiems labai didelę pragulų riziką
Kontraindikacijos	Nežinomos
Leidžiamas paciento svoris min. - maks.	20-120 kg
Medžiaga	<ul style="list-style-type: none">• Užpildas: PU putos (HR / Gel)• Užvalkalas: PU dengta PES pagrindinė medžiaga, neslystančia apačia
Išmatavimai	Žr. ant gaminio esančią etiketę
Gaminio svoris	Visi dydžiai apie 1,5 kg
Pagalbos numeris (pagal §139 SGB V)	
Medicinos priemonė	1 klasė, MDR 2017/745
Techninė sauga / antipireninės savybės	Antipireninių savybių bandymas atliktas pagal DIN EN 597 I + II, BS 7175 sec 3 crib 5, BS 7177
Toksikologinio nekenksmingumo tyrimas / biologinis suderinamumas	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Įspėjimai	Prieš pirmą kartą naudojant sistemą reikia paruošti ją naudoti pirmą kartą (žr. „Sistemos paruošimas naudojimui“).
Garantija	3 metų garantija taikoma putplasčio užpildo funkcinėms savybėms (proporcinė garantija)
Techninė priežiūra	Nėra
Valymo instrukcijos (pagalvės užvalkalas)	Užvalkalą galima dezinfekuoti nuvalant prekyboje esančiomis dezinfekavimo priemonėmis, pagamintomis iš izopropanolio (pvz., „Bacillol“), arba kitomis tinkamomis DGHM sąraše nurodytomis priemonėmis (pvz., „ECOLAB“ valymo servetėlė „Incidin OxyWipe S XL“). Chemoterminis užvalkalo valymas taip pat galimas. Užvalkalas gali būti apdorojamas ir autoklave pagal RKI nurodymus.
Valymo instrukcijos (užpildas)	Putplasčio užpildą be užvalkalo galima valyti buitinėmis priemonėmis. Tai galima padaryti leidžiant suteptam plotui pamirkti arba apipurškiant visą putplasčio užpildą dezinfekuojančia priemone (pvz., „Bacillol“ arba „ECOLAB“ putų purškalu „Incidin OxyFoam S“, kurio sudėtyje yra vandenilio peroksido). Tada putplasčio užpildą reikia natūraliai išdžiovinti. Putplasčio užpildą galima apdoroti autoklave pagal RKI nurodymus.
Sistemos paruošimas naudojimui	<ol style="list-style-type: none">1. Išimkite pagalvėlę iš dėžės.2. Padėkite pagalvėlę ant neįgaliųjų vežimėlio ar kėdės sėdimosios dalies, priekyje esančiu užrašu „ŠIA PUSE Į VIRŠŲ“ („THIS SIDE UP“) į viršų.

RKI = Robert Koch Institutas

DHGM = Vokietijos higienos ir mikrobiologijos draugija

MPG = Medicinos prietaisų įstatymas

Kaitinimas autoklave = fracinis vakuuminis procesas 55 minutes esant 105 °C.

Gamintojas MPG ir MDR 2017/745 prasme

Funke Medical AG • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: + 49-2865-266 93 50 • Faks.: + 49-2865-8133

info@funke-medical.de • www.funke-medical.de

Atsisiųsta: 2020-07-02 13:10