



# Sissel® Portal Pro Alu Light portatyvios masažo kėdės instrukcija

Art. nr. 301.010




## SISSEL® PORTAL PRO ALU LIGHT MASAŽO KĖDĖS DALYS

1. veidui skirta dalis
2. galvos atrama, dengta apmušalu
3. paminkštinimas krūtinei
4. rankų atrama
5. sėdynė
6. atrama- paminkštinimas keliams
7. dirželis, rankų atramai reguliuoti
8. aukščio reguliavimas
9. galvos atramos nuolydžio reguliavimas
10. nuolydžio reguliavimas




## SĖDĖJIMO AUKŠČIO REGULIAVIMAS

- Įspauskite mygtuką (8)
- Nustatykite norimą aukštį
- Leiskite mygtukui užsifikuoti reikamoje padėtyje

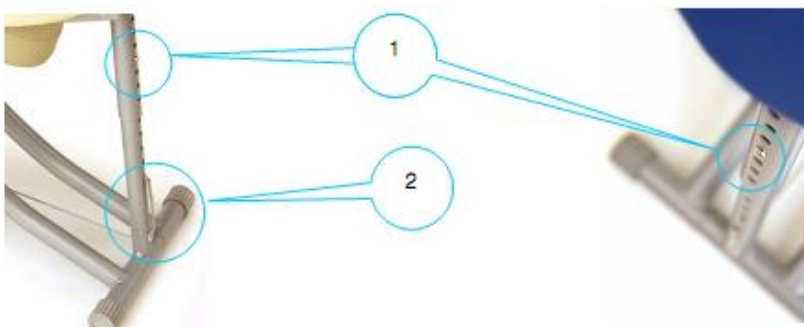

## NUOLYDŽIO REGULIAVIMAS:

- Įkiškite sijos galą į kitą vietą (10)
- Aukščiau- aštrus kampas, trumpas atstumas
- Žemiau- bukas kampas, ilgas atstumas
- Įsitikinkite, kad kėdė stabili prieš pradėdant ja naudotis

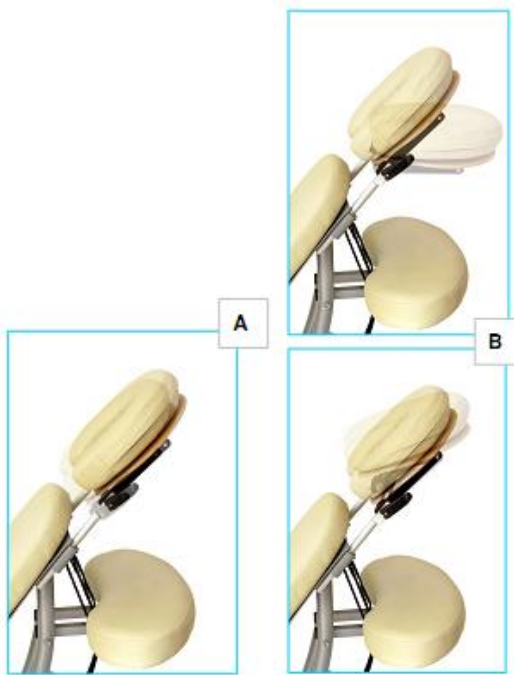

**A- GALVOS ATRAMOS AUKŠČIO  
REGULIAVIMAS**  
**B- GALVOS ATRAMOS KAMPO  
REGULIAVIMAS**



**VEIDO ATRAMOS TVIRTINIMAS (1)**



**GALVOS ATRAMOS NUOLYDŽIO  
REGULIAVIMAS (9)**  
Atlaisvinkite, reguliuokite, fiksuo­kite.



**RANKŲ ATRAMOS  
REGULIAVIMAS DIRŽELIU (7)**  
Atlaisvinkite, reguliuokite, fiksuo­kite.



## **DĖMESIO!**

1. Prieš kiekvieną naudojimą, patikrinkite ar kėdė geros būklės
2. Visi varžtai ir veržlės turi būti tvirtai užsukti, metalinės, plastikinės ir minkštosios dalys turi būti be įplėšimų, įbrėžimų ir pan.
3. Saugokite pirštus, nekiškite jų tarp judančių detalių
4. Laikykite kėdę ant stabilaus, neslidaus paviršiaus

## **VALYMAS**

SISSEL® Portal Pro Alu Light kėdę valykite šiltu muiliniu vandeniu arba švelniu, valikliu, kurio sudėtyje nėra alkoholio, tuomet nušluostykite drėgnu, o po to sausu audiniu.